



Justinuskirchstraße 5

65929 Frankfurt am Main

Telefon: 069 – 300 653 51

Mobil: 0174 – 27 55 300

Gebrauchsanweisung für orthopädische Einlagen

WIRKUNGSPRINZIP:

Unsere Einlagen stützen Ihre Füße dort, wo aufgrund desolater Bänder oder Muskeler schlaffung die natürliche Gewölbstruktur verloren gegangen ist und deshalb Fehlbelastungen vorliegen.

Gleichzeitig betten die Einlagen schmerzende Partien des Fußes angenehm weich und reduzieren die Druckbelastung an Ihrer Fußsohle.

Durch polsternde Materialien wird Ihre Wirbelsäule beim Gehen vor harten Stößen geschützt. Ebenso werden Fehlhaltungen und Überbelastungen der Gesamtkörperstatik optimiert.

TRAGETIPPS:

Steigern Sie die Tragedauer Ihrer Einlage Stufenweise und nutzen Sie diese nur in dem dafür vorgesehenen Schuhwerk. Insbesondere die Absatzhöhe ist entscheidend um einen optimalen Sitz der Einlage zu gewährleisten.

Prüfen Sie ihre Füße stets auf Rötungen, Druckstellen und Blasen. Treten diese auf, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

Bitte lassen Sie die Einlagen in regelmäßigen Abständen kontrollieren (ca. alle 6 Monate). Eine Einlage hat eine maximale Lebensdauer von einem Jahr, anschließend verliert sie an Stabilität und somit an Funktionalität.

Bitte beachten Sie, dass eine verschlissene oder verwachsene Einlage schnellstmöglich ausgetauscht werden sollte.

Das Tragen einer nicht passenden oder verschlissenen Einlage kann zu erheblichen Schädigungen des Gehapparates führen!

REINIGUNG:

Zur hygienischen Pflege von Kunststoff- und Microfaserbezügen empfehlen wir das Reinigen mit einem feuchten Tuch.

Lederbezogene Einlagen sollten nach Gebrauch regelmäßig zum Lüften aus den Schuhen entnommen und schonend getrocknet werden.

Trocknen Sie Ihre Einlagen nicht an der Heizung oder anderen Wärmequellen.

Text Copyright © bei Vanessa Dreher

im Auftrag von

EXCLUSIV_E Schuh und Fußversorgung